

PORGES



EasiVac

Engangs urologisk chip evakuator

EasiVac

1. Kraftig utsug!

Kombinasjonen av den kraftige EasiVac pumpen og anti-reflux systemet gir en effektiv og rask oppsamling av alle gjenværende chips.

2. Trygt og praktisk

Den uknusbare kontaineren har et lokk for forsegling før preparatene sendes til patologisk analyse.

3. Enkel tilkobling


EasiVac har ulike koblinger til bruk på de fleste resektoskop (ACMI, Olympus, Storz, Wolf).

4. Unikt oppsamlingssystem

Easivacs anti-reflux system (ventil og filter) sikrer rask og komplett oppsamling av chips etter reseksjon.



Bruksanvisning.

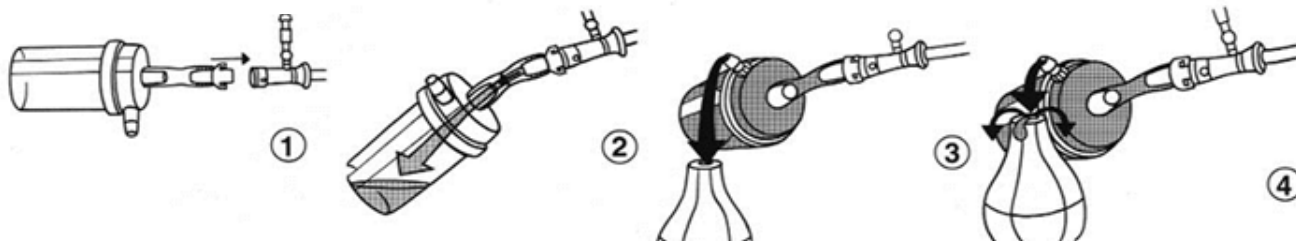


1) Koble EasiVac til resektoskopet. 2) Fyll opp til fullt. 3+4) Klem luft ut fra ballongen og fyll opp med væske.

5+6) Koble til ballongen og skyl. 7) Etter skylling, tøm ut væsken fra evakuatoren

8) Ta av lokket, hold på filteret for å tømme ut overflødig væske. Fjern filteret og skru på det gule lokket.

NB! Vekt uten gult lokk og merkelapp: 26 gram, vekt med gult lokk og merkelapp: 36 gram.

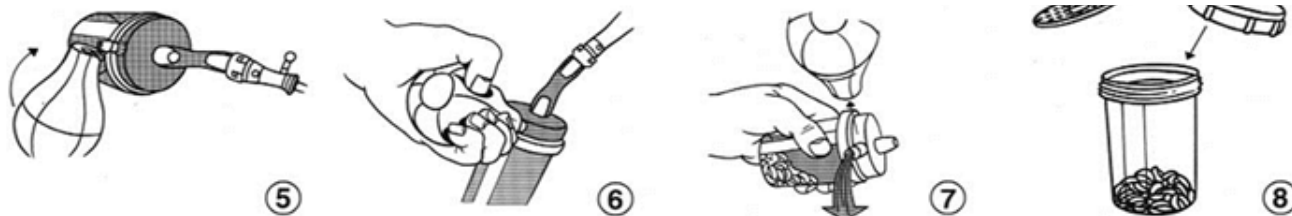

Bestilling

Prod.nr.	Resektoskop tilkobling	Ant. pr. eske
E80103	Wolf	20
E80203	Storz	20
E80303	Olympus	20

ENDOMED

Professor Birkelands vei 34 B

1081 Oslo.

Tlf: +47 23 17 24 00

Fax: +47 23 17 24 01

www.endomed.no

Holtedam 1 DK-
3050 Humlebæk
Denmark

www.coloplast.com